



Anleitung zur Anwendung Einzeltest-Kit bei positiven Pools

Das Einzeltest-Kit **darf ausschliesslich zur Bestätigung** eines positiven Pools verwendet werden. Das Einzeltest-Kit enthält 10 Spuckeinheiten mit leichter Kochsalzlösung, 10 Auftragsformulare für das Labor sowie 10 Rücksendecouverts. Nach der individuellen Speichelprobenentnahme sendet die Poolmanagerin bzw. der Poolmanager oder die betroffene Person die Einzelproben, gekennzeichnet mit der vom Formular übertragenen Barcode-Etikette und die ausgefüllten Formulare im Rücksendecouvert ans Labor. Die Testresultate der Einzelproben werden direkt vom Labor an die auf dem Auftragsformular angegebene Person übermittelt. Das Contact Tracing des Kantons wird bei positivem Einzeltest mit der auf dem Formular angegebenen Person Kontakt aufnehmen.

Ablauf

- 1) Bei **positivem Pool** gelten erhöhte Schutzmassnahmen, die Teilnehmenden müssen einen **Einzel-Bestätigungstest** machen.
- 2) **Einzeltest-Kit nehmen:** Im Einzeltest-Kit befinden sich Formulare, Anleitung, leichte Salzlösung, Trichter und das Probenröhrchen. Entsorgen Sie die unbeschriftete Etikette.
- 3) **Formular ausfüllen (siehe Anleitung):** Stellen Sie sicher, dass der Name der Versicherung, die Versichertenkartennummer und alle Kontaktangaben **der zu testenden Person** vollständig angegeben sind.
- 4) **Probenröhrchen auspacken:** Probenröhrchen mit Trichter und Schraubverschluss bereitstellen.
- 5) **Matrix-Barcode Etikette vom Formular auf Probenröhrchen aufkleben**
- 6) **Probe gewinnen:** Leichte Salzlösung in den Mund geben. 30-60 Sekunden den Mund gut spülen (wie Zahnwasser, **NICHT Gurgeln**, Gefahr von Aerosolen).
- 7) **Speichel in Probenröhrchen geben:** Die Mundflüssigkeit über den Trichter sorgfältig in das Röhrchen lassen. Trichter entfernen, Deckel aufschrauben und Röhrchen eine halbe Minute gut schwenken, um die Flüssigkeit zu homogenisieren. Trichter entsorgen.
- 8) **Verpacken und avisieren Kurierdienst:** Die Poolmanagerin bzw. der Poolmanager legt die Formulare zusammen mit den etikettierten Einzelproben in das Rücksendecouvert. Es dürfen maximal 10 Probenröhrchen mit aufgeklebten Etiketten in einem Rücksendecouvert verpackt werden. Die Poolmanagerin bzw. der Poolmanager bestellt den Kurierdienst für die Abholung bei der Dienststelle unter der folgenden Telefon-Nummer: **0800 79 67 78** (Logistik SYNLAB, Mo – Freitag, 07.30 – 20.00 Uhr)
- 9) **Testresultat:** Die Testresultate werden der Einzelperson direkt vom Labor mitgeteilt. Bei positivem Befund wird das Contact Tracing des Kantons informiert. Personen mit einem positiven Resultat müssen in Isolation. Bei negativem Resultat darf der Arbeit wie gewohnt nachgegangen werden.



Formular und Testresultat

Formular ausfüllen

1. Personaldaten angeben
2. Name der Versicherung und Versichertennummer eintragen
3. Visum Poolmanager, Zeit der Probenentnahme angeben
4. Kontaktangaben **E-Mail UND Mobil Nummer der Testperson** zum Abruf des Testresultats angeben, Visum Poolmanager*in
5. Analyse markieren
6. Etikette auf Probenröhrchen kleben

The image shows a screenshot of the SYNLAB COVID-19 test form. It is divided into several sections with numbered annotations:

- 1:** Patient data section (Name: Muster, Vorname: Max, Geb. Datum: 10.01.2000, Geschlecht: M, Adresse: Musterstrasse 3, PLZ: 6010, Ort: Kriens).
- 2:** Insurance information section (Name der Versicherung, Versichertennummer).
- 3:** Appointment and contact information section (Auftraggeber: Muster, Datum: 24.12.2020, Uhrzeit: 12:00).
- 4:** Additional clinical information section (Acute illness, duration of symptoms, previous RT-PCR, etc.).
- 5:** Signature section (Patient's signature and contact information: 0792465316@muster.max@gmx.ch).
- 6:** Barcode section at the bottom of the form.

Testresultat

Das Testresultat kann direkt auf dem Patientenportal des Labors mit den im Formular angegebenen Kontaktangaben abgerufen werden. **Bis zum Vorliegen des Resultats gelten erhöhte Schutzmassnahmen**, Maske tragen, Abstand halten, Kontakt mit Personen vermeiden. Sie erhalten das Resultat des Einzeltests direkt vom Labor. Die Anleitung zum Laborportal kann unter folgendem Link abgerufen werden:

<https://www.synlab.ch/corona-info/coronavirus/patienteninformation>

